
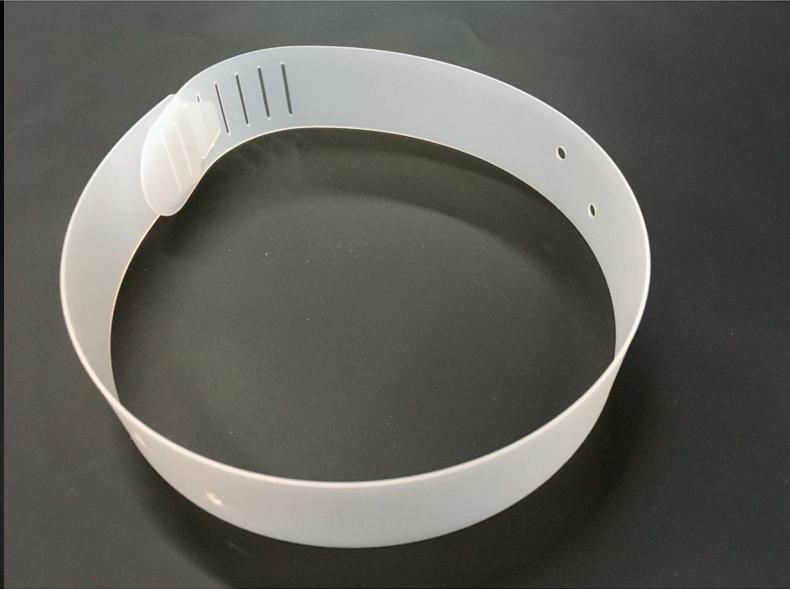


KIT MASQUE DE PROTECTION

Conseil de nettoyage:
Utiliser de l'eau chaude avec un détergent vaisselle
et un chiffon microfibre vitre

- 1x languette tour de tête
- 4x vis femelle
- 4x vis mâle
- 1x visière PETG

1) Ajustez la languette à votre tour de tête

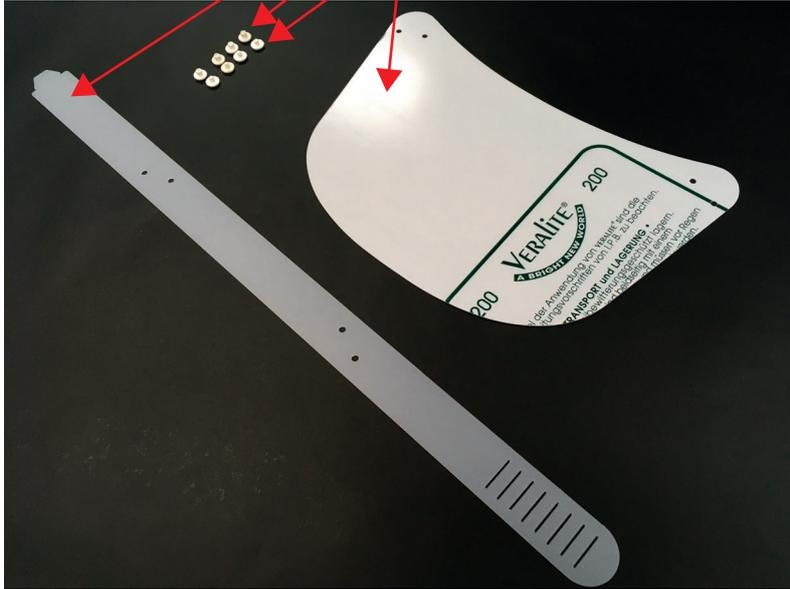

2) Insérez le vis femelles dans les trous du tour de tête

3) Dé-péliculez légèrement les films de protection au **RECTO** et au **VERSO**
4) Insérez la visière dans les vis



5) Vissez les vis mâles, il n'est pas nécessaire d'utiliser un tournevis

6) Enlevez les films de protection, votre masque est prêt

